



Mobilní koupací vana

Návod k použití




Popis:

Koupací vana je určena k provádění osobní hygieny ležících pacientů obsluhujícím personálem. Vana je určena k průtočnému omývání. K zachytávání použité vody je možno použít kýbl 15 l, který je součástí balení.

Instalace vany:

Při instalaci mobilní vany je potřeba brát ohled na zdravotní stav pacienta. Pacienta přesuňte nebo překulte na bok k jedné straně lůžka a vanu položte po celé délce lůžka. Vanu na straně u pacienta po délce přeložte tak, aby po překulení pacienta na druhý bok bylo možno vanu rozvinout. Po rozvinutí vany upevněte boky vany tak aby voda nemohla vytékat. Kupevnění je možno použít například přiložené gumové úvazce. Použití úvazců závisí především na velikosti a konstrukci lůžka. Možné způsoby použití úvazců jsou uvedeny na obrázku. Při instalaci na lůžko o velikosti ložné plochy 200x90 cm obvykle stačí připevnit vanu v rozích. Pokud vzhledem k charakteru čel a bočnic lůžka, není možno použít úvazce doporučujeme použít například truhlářské kleštiny nebo velké kolíčky. Kleštiny nesmí mít ostré kovové hrany, které mohou poškodit materiál vany. Při opakovaném použití v jednom lůžku, je možno použít nalepovací suché zipy. Tyto suché zipy Vám na požádání rádi zašleme.

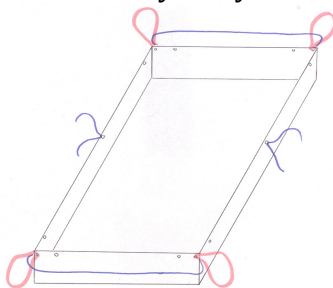

Vanu doporučujeme instalovat s odtokovým rukávem v nohách lůžka. Po instalaci vany zkontrolujte, zda není odtokový rukáv přiskřípnutý nebo přeložený a jeho konec zaveďte do odpadu, nebo do kýble. Pokud to lůžko umožňuje, napoložte lůžko do mírného sklonu, aby mohla voda plynule odtékat a pacient v této vodě neležel. Sprchování provádějte s ohledem na míru postižení a stáří pacienta vlažnou vodou.

Skladování, údržba a ošetřování:

Vanu po použití nechte oschnout, nebo otřete suchým hadrem. K čištění vany je možno použít běžné mýdlové čisticí prostředky. K desinfekci vany je možno použít prostředky s účinnými látkami 3-aminopropyl, dodecylamin, didecyldimethylamonium chlorid, alkyldimethylbenzylamonium chlorid. Například tyto desinfekční prostředky

Desam Extra - Ředit s vodou na čisticí roztok v poměru 1%

Desprej - Použit přímo rozprašovač na balení, nestírat. VYSOCE HOŘLAVÝ!

Desam Wipes - Dezinfekční ubrousky napuštěné směsí alkoholu. VYSOCE HOŘLAVÝ!

Vanu skladujte v suchu, nevystavujte přímému slunci v teplotě do 40 °C. Při uskladnění v teplotách pod bodem mrazu nechte vanu před rozbalením přizpůsobit pokojové teplotě po dobu alespoň 2 h.

Mobilní koupací vana má atest Státního zdravotního ústavu. U výrobku byla také testována kožní snášenlivost dle ČSN EN ISO 10993-10. Zkušební protokol SZÚ CLČ 551-1636/10-222. Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

Záruka:

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením a nesprávným skladováním.

Dodavatel:

Ortoservis s.r.o., Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8 – Libeň
www.ortoservis.cz tel. 266 313 652

