



NÁSTAVCE NA WC

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. KÓDY	3
2. ÚVOD.....	3
3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.....	3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	3
5. OBECNÁ VAROVÁNÍ	4
6. SYMBOLY	4
7. PŘEHLED ČÁSTÍ	4
8. NÁVOD K INSTALACI.....	5
9. PÉČE A ČIŠTĚNÍ	5
10. UPOZORNĚNÍ.....	6
11. TECHNICKÁ DATA	6
12. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	6
13. PODMÍNKY LIKVIDACE.....	6
14. ZÁRUKA	6
15. OPRAVY	7
15.1 Záruční opravy	7
15.2 Opravy, na které se nevztahuje záruka	7
15.3 Nezávadný výrobek.....	7
16. NÁHRADNÍ DÍLY	7
17. KLAUZULE O OSVOBOZENÍ	7

 Zdravotnický prostředek I.třídy
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2017/745
 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP400-6 Univerzální nástavec na WC (6 cm)
RP410-6 Univerzální nástavec na WC s víkem (6 cm)

RP400-10 Univerzální nástavec na WC (10 cm)
RP410-10 Univerzální nástavec na WC s víkem (10 cm)

RP400-14 Univerzální nástavec na WC (14 cm)
RP410-14 Univerzální nástavec na WC s víkem (14 cm)

2. ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili univerzálních WC nástavec MOPEDIA od společnosti Moretti, který je vyráběn pro podporu lidí s pohybovými obtížemi. Jeho design a kvalita zaručují maximální pohodlí, odpovědnost a bezpečnost. Univerzální WC nástavce MOPEDIA od společnosti Moretti jsou navrženy a vyrobeny tak, aby uspokojily všechny vaše potřeby. Tento návod k použití obsahuje několik užitečných tipů, jak výrobek správně používat a několik důležitých upozornění pro vaši bezpečnost. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám bude schopen správně pomoci.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Univerzální WC nástavec MOPEDIA je výrobek, které pomáhá lidem s pohybovými obtížemi při používání toalety.

VAROVÁNÍ!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Moretti S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli následky nesprávného použití tohoto výrobku a za důsledky neoprávněné úpravy konstrukce výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto návodu k použití bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že produkt vyrobený a prodáváný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny WC NÁSTAVCE - MOPEDIA je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ze dne 5.dubna 2017.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Výrobek splňuje požadavky obecné bezpečnosti a výkonu požadované přílohou I nařízení 2017/745, jak jsou stanoveny v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Výrobek nepatří mezi MĚŘICÍ NÁSTROJE.
3. Výrobek NENÍ URČEN PRO KLINICKÉ ZKOUŠKY.
4. Výrobek je balen v NESTERILNÍM BOXU.
5. Výrobek patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.

6. Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

Poznámka: Kompletní kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou obsaženy v prohlášení o shodě EU, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

5. OBECNÁ VAROVÁNÍ

Před použitím výrobku si pečlivě PŘEČTĚTE celý návod k použití.


- Ujistěte se, že je výrobek kompletní a udržujte jej mimo zdroje tepla.
- Doporučujeme použití jedním uživatelem.
- Před každým opětovným použitím musí být zařízení dezinfikováno.
- ŽIVOTNOST výrobku je určena opotřebením dílů, které nelze opravit/vyměnit. Životnost nebude v žádném případě delší než 10 let.
- NEDOVOLTE dětem hrát si s výrobkem.
- Uživatel a/nebo pacient musí ohlásit jakoukoli vážnou nehodu, která se stala v souvislosti s výrobkem, výrobci a příslušnému místnímu státnímu orgánu.

6. SYMBOLY


	Kód výrobku		Výrobní šarže
	Jedinečná identifikace výrobku		Zdravotnický prostředek
	Prostudujte návod k použití		Označení CE
	Podmínky likvidace		Výrobce

7. PŘEHLED ČÁSTÍ

A. Nástavec na WC B. Šroub

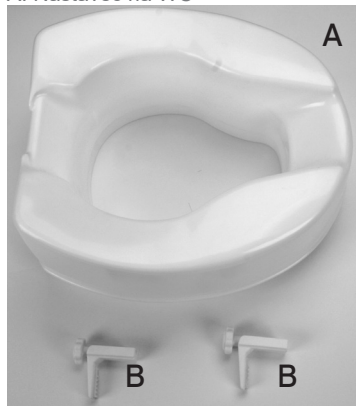

(Obrázek je pouze ilustrativní)

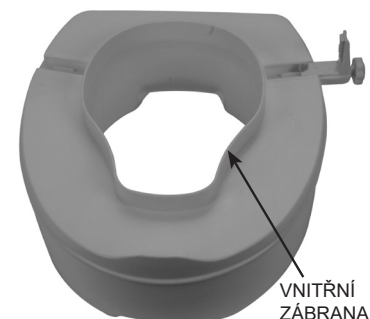

(Obrázek je pouze ilustrativní)



8. NÁVOD K INSTALACI

1. Vložte šrouby následujícím způsobem: otočte nástavec na WC Mopedia dnem vzhůru a položte jej na rovnou plochu. Vložte šrouby z boku do příslušných drážek. Zatlačte je dovnitř a otočte šrouby ve směru hodinových ručiček, abyste je zajistili na nástavci. Šroub zajistěte na kraji tak, aby L díl šroubu byl v co nejvzdálenější pozici, předejdete tak problémům s uchycením nástavce na WC.



VAROVÁNÍ!

Pokud se šroub otáčí volně: dobře zatlačte šroub proti závitů vytvarovanému na nástavci a vyvíjejte na šroub stálý tlak. Tak, aby byl zajištěn kontakt mezi šroubem a závitěm.

POZNÁMKA: V této fázi šrouby neutahujte, jinak nebude možné umístit nástavec MOPEDIA na toaletní mísu.

2. Zvedněte víko a záchodové prkénko a položte univerzální nástavec na WC Mopedia na keramiku. Držáky musí být otočeny k zadní části toalety. Ujistěte se, že vnitřní zábrana nástavce je umístěna uvnitř toalety a přední zábrana je umístěna vně. Vezměte prosím na vědomí, že nástavec na WC musí být kompatibilní s tvarem toaletní mísy.

POZNÁMKA: Nástavec na WC by měl být na toaletní míse umístěn v dokonale rovné poloze.

3. Otáčejte šrouby ve směru hodinových ručiček, dokud nebude nástavec na WC Mopedia dobře upevněn k WC a nebude se pohybovat.



VAROVÁNÍ!

Systém upevnění nástavce byl speciálně navržen tak, aby umožňoval snadné utažení, proto by se nemělo pokračovat v utahování, jakmile ucítíte odpor.


9. PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Všechny části nástavce na WC lze čistit mýdlem a horkou vodou nebo dezinfikovat specifickými přípravky.

10. UPOZORNĚNÍ

- Nástavec na WC by neměl být používán uživateli s hmotností vyšší než 136 kg.
- Než nástavec zatížíte, ujistěte se, že je bezpečně na svém místě. Nástavec na WC by měl být kontrolován každý měsíc, aby bylo zajištěno jeho bezpečné upevnění.
- Nepoužívejte nástavec jako oporu při usedání a vstávání z toalety.

11. TECHNICKÁ DATA

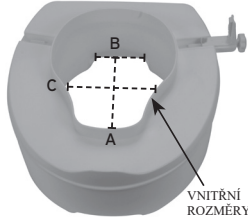Vnější rozměry	 D: 42 cm	 Š: 37,5 cm	
Vnitřní rozměry 	A: 27 cm	B: 10 cm	C: 22 cm
Maximální nosnost	136 kg		

12. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství naleznete v hlavním katalogu společnosti Moretti.

-RP431 Sada šroubů

13. PODMÍNKY LIKVIDACE



Výrobek není určen k likvidaci společně s komunálním odpadem. Doporučujeme výrobek dopravit k likvidaci ve sběrném dvoře.

14. ZÁRUKA

Na materiál nebo výrobní vady výrobků společnosti Moretti se vztahuje záruka po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s níže uvedenými výjimkami. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím, změnami výrobku nebo použitím, které není v souladu s návodem k použití. Zámýšlené použití výrobku je uvedeno v tomto návodu k použití.

Společnost Moretti neodpovídá za škody/zranění osob způsobené nesprávnou instalací nebo v souvislosti s ní. Společnost Moretti neposkytuje záruku na své výrobky při škodách nebo vadách v následujících případech: přírodní katastrofy, neoprávněná údržba nebo opravy, škody způsobené problémy s elektrickým napájením (pokud je k dispozici), použití částí nebo součástí, které společnost Moretti neposkytuje, selhání při plnění pokynů pro použití, neoprávněné změny, poškození způsobené přepravou (jinou než původní dodání společností Moretti) nebo selhání při údržbě zařízení uvedené v návodu k použití. Na součásti, které jsou vystaveny opotřebením při běžném používání výrobku, se záruka nevztahuje.

15. OPRAVY

15.1 Záruční opravy

V případě, že se u výrobku do společnosti Moretti objeví během záruční doby vady materiálu nebo výrobní vady, Moretti potvrdí zákazníkovi, zda se na vadu vztahuje záruka. Společnost Moretti může dle vlastního uvážení opravit nebo vyměnit položku v záruce u prodejce nebo v místě společnosti Moretti. Mzdové náklady na opravu mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neobnovuje ani neprodlužuje záruku.

15.2 Opravy, na které se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím souhlasu zákaznického servisu Moretti. Mzdové a přepravní náklady na opravu, na kterou se nevztahuje záruka, ponese plně zákazník nebo prodejce. Na opravy těchto výrobků, se poskytuje záruka po dobu šesti (6) měsíců od data obdržení opraveného výrobku.

15.3 Nezávadný výrobek

Zákazník bude informován, pokud po přezkoumání a otestování vráceného výrobku společnost Moretti, nebude výrobek shledán vadným. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu uhradí zákazník.

16. NÁHRADNÍ DÍLY

Originální náhradní díly Moretti jsou garantovány po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne nákupu.

17. KLAUZULE O OSVOBOZENÍ

S výjimkou toho, co je jasně uvedeno v této záruce a v souladu se zákonem, nenabízí společnost Moretti SpA svým klientům žádné další prohlášení, záruku ani podmínku, vyjádřenou nebo implicitní, včetně jakéhokoli prohlášení, záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel. Společnost Moretti S.p.A nezaručuje, že používání výrobků společnosti Moretti bude nepřetržité a bezchybné. Doba trvání možných implicitních záruk, které lze uplatnit v souladu se zákonem, je omezena na záruční lhůtu. Některé státy nebo země nepovolují omezení trvání implicitní záruky, nebo osvobození, nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod souvisejících s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích nesmí být pro uživatele uděleno osvobození nebo omezení této záruky. Tato záruka podléhá změnám bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek _____

Datum prodeje _____

Prodejce _____

Adresa _____ Město _____

Zákazník _____

Adresa _____ Město _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20139 Cavriaga (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

Dodavatel



PRAHA

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8

tel./fax: 266 313 652

ortoservis@ortoservis.cz

BRNO

Minská 100, 616 00 Brno - Žabovřesky

tel./fax: 541 240 393

brno@ortoservis.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice

tel./fax: 387 432 502

cb@ortoservis.cz

OPAVA

Pivovarská 7/71, 746 01 Opava

tel./fax: 553 775 226

opava@ortoservis.cz

www.ortoservis.cz

Společnost Ortoservis s.r.o., Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8 je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72014, IČO 26121760

Výrobce

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com